

هل تعرفون أن أكثر من ٩٠.٠٠٠ طبيب في العالم يستخدمون درموجت Dermojet ؟

درموجت Dermojet® ابتكره طبيب لفائدة الأطباء وهو الدكتور كرانتز Dr Krantz الذي اخترع محقنة بدون إبرة. إن درموجت Dermojet هو نتيجة أبحاثه الطبية .

درموجت Dermojet يحقن جميع أنواع السوائل (المخدرة ، والقشرانية ، واللقاحات ...) بالحقن داخل الجلد بدون إبرة وبدون ألم وبدون ملامسة جلد المريض .

إن أكرا درموجت AKRA Dermojet ، وهو متخصص في الحقن بدون إبرة ، يبتكر ويصنع ويسوق تشكيلة درموجت Dermojet لتساعدكم في معالجة الآلاف من المرضى في أنحاء العالم .

بفضل ٥٠ سنة من المهارة والخبرة تستجيب محاقننا إلى حاجة الأطباء في جميع البلدان .

تتوافر ٤ طرازات من درموجت Dermojet® . جميع طرازاتنا تتقيد بمعايير المجموعة الأوروبية وإيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٨ :



درموجت الطراز النموذجي Dermojet Standard :

درموجت الطراز النموذجي Dermojet Standard على شكل أسطواني وينقسم إلى ٤ أجزاء :

جسم المحقنة وهو مصنوع بأكمله من المعدن ، ومكبس مركزي ، ونابض ضغط ورافعة إصلاح . رأس الحقن .

خزان شفاف مصنوع من البلاستيك يحتوي على السائل الواجب حقنه ، سعته ٤ مليلتر (يعني ٤٠ جرعة

تحتوي كل جرعة منها على ١,٠ (مليتر) .
وزنه حوالي ٣٠٠ غرام . يمكن تعقيم درموجت الطراز النموذجي Dermojet Standard في المعقم على درجة حرارة تصل إلى ١٣٤ درجة مئوية لمدة ١٨ دقيقة .

• الاستخدامات في الطب البيطري (تطعيم ضد التهاب أنسجة الأرنب Myxomatose ، قرحية الخرفان (إكثيما) Ectima ، حقن بالسليين ، تخدير موضعي ...) .

درموجت « HR » Dermojet يماثل درموجت النموذجي Dermojet Standard ولكنه مخصص للاستعمال الطبي ، وهو مزود بخزان من البيركس وبطرف من الإينوكس ، ويمكن تعقيمه على درجة حرارة لا تزيد عن ١٨٠ درجة مئوية .

• الاستخدامات في الطب البشري (تخدير موضعي ، حقن القشرانيات ، معالجة الندوب التضخمية والمتورمة، معالجة الثآليل) .

درموجت الآلي Dermojet Automatique على شكل فرد يطلق عند كبس الرافعة ، على الفور وحسب الطراز المستعمل ، جرعات منتظمة قدرها ١,٠ (مليتر) (٢٠٠ جرعة في أنبوبة ٢٠ مليتر) .

الاستخدامات في الطب البيطري ، تطعيم ضد التهاب أنسجة الأرنب Myxomatose ، حث إباضة الأرنب بواسطة الإخصاب الاصطناعي ، تطعيم ضد د/التهاب أنسجة الأرنب VHD/Myxomatose بلقاح دركونيمكس® Dercunimix (يلزم استخدام رأس بثلاث فتحات) :

درموجت بوليمديكال® Dermojet Polymedical له رأس حقن مزودة بنظام لتثبيت أطراف قابلة للاستبدال ، أحادية الدفعة Monojet ، من الإينوكس . يستعمل في طب الجلد وخاصة لعلاج الثآليل .

الأطراف المتعددة الدفعات والمتزامنة لها من ٣ إلى ٥ فتحات وتسمح بحقن جرعات صغيرة تختلف من ٠,٣٢ مليتر إلى ٠,٠٢ مليتر بدفعات متعددة multijets .

درموجت بوليمديكال® Dermojet Polymedical متوفر أيضاً على شكل الطراز الآلي . وقد ابتكر طراز جديد لتبسيط تنظيفه وتعقيمه :